
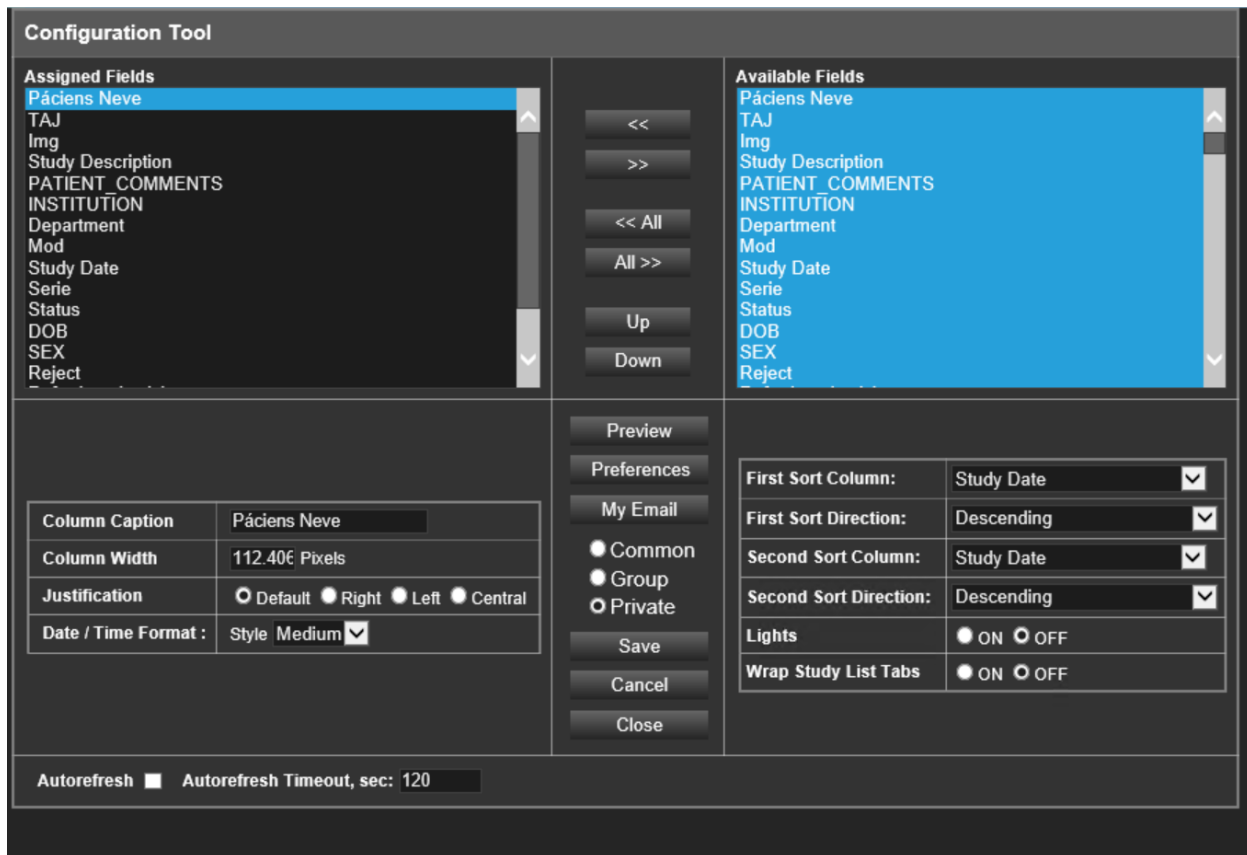


 GE Healthcare	Centricity Universal Viewer	Centricity UV release: SP 9
Kiegészítő dokumentáció- Vizsgálathoz tartozó információk oszlop módosítás		

Oszlop módosítás:

Nyissa meg a GE PACS-ot. A munkalistán a jobb felső sarokban lévő ikonok közül válassza ki a “Configuration Tool”-t .

Új ablak jelenik meg:



Jelölje ki a módosítani kívánt csoportot bal egérgombbal.

Ezután a “Column Width” résznél manuálisan tudja módosítani a paramétereket.

Column Caption	Páciens Neve
Column Width	112.40€ Pixels
Justification	<input type="radio"/> Default <input checked="" type="radio"/> Right <input type="radio"/> Left <input type="radio"/> Central
Date / Time Format :	Style Medium 