
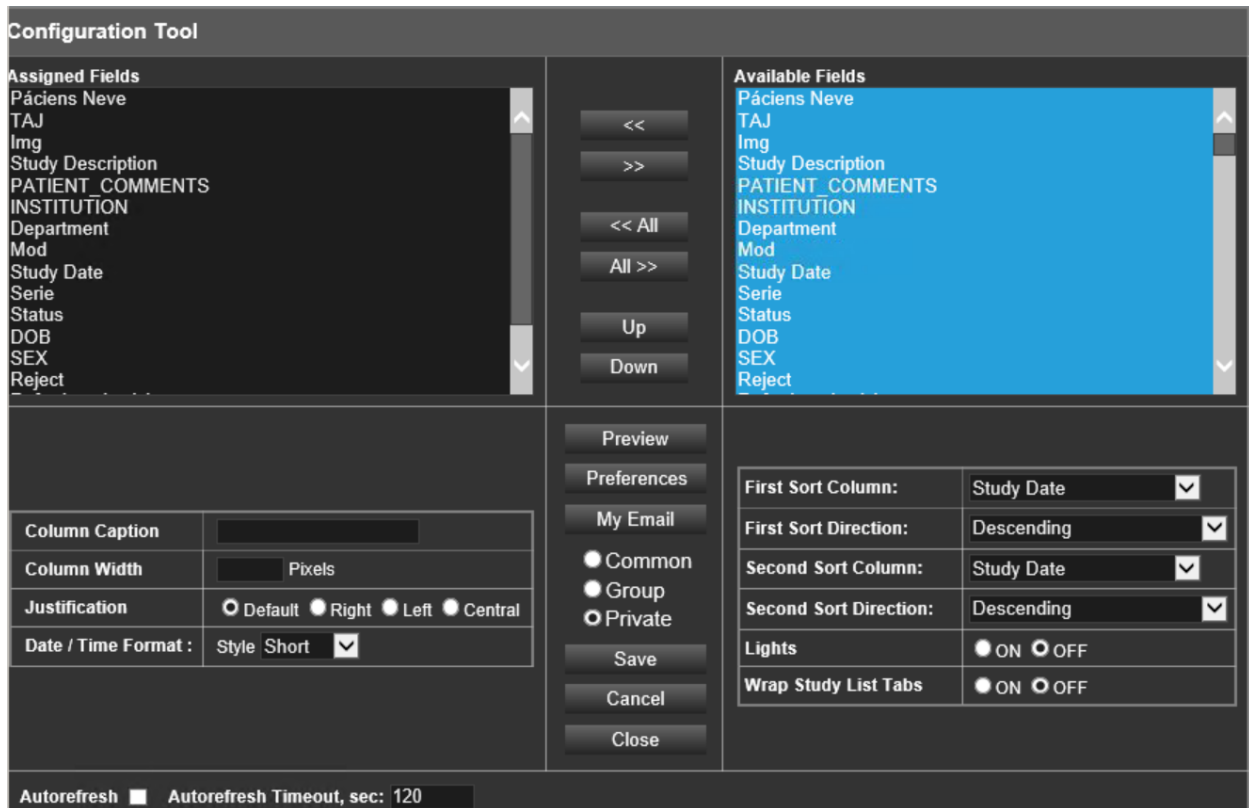


 GE Healthcare	<h1>Centricity Universal Viewer</h1>	Centricity UV release: SP 9
Kiegészítő dokumentáció- Sürgős Vizsgálat		

Sürgős vizsgálat létrehozása:

STAT funkció beállítása:

Nyissa meg a GE PACS-ot. A jobb felső sarokban található ikonok közül kattintson a Configuration Tool  ikonra. Megjelenik egy új ablak.



Configuration Tool

Assigned Fields
Páciens Neve
TAJ
Img
Study Description
PATIENT_COMMENTS
INSTITUTION
Department
Mod
Study Date
Serie
Status
DOB
SEX
Reject

Available Fields
Páciens Neve
TAJ
Img
Study Description
PATIENT_COMMENTS
INSTITUTION
Department
Mod
Study Date
Serie
Status
DOB
SEX
Reject

Column Caption:

Column Width: Pixels


Justification: Default Right Left Central

Date / Time Format: Style Short

Autorefresh Autorefresh Timeout, sec: 120

Válassza ki a „Preferences” fület-kattintson rá.

Új ablak jelenik meg:

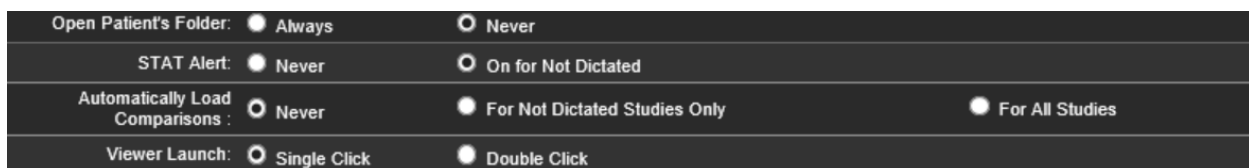

Open Patient's Folder: Always Never

STAT Alert: Never On for Not Dictated

Automatically Load Comparisons: Never For Not Dictated Studies Only For All Studies

Viewer Launch: Single Click Double Click

A „STAT Alert” lehetőségnél jelölje be az „On for Not Dictated” opciót.


Ezzel beállította azt, hogy ha egy vizsgálat „STAT”-ként van jelölve, a listában pirossal ábrázolódjon.

 GE Healthcare	Centricity Universal Viewer	Centricity UV release: SP 9
Kiegészítő dokumentáció- Sürgős Vizsgálat		


Vizsgálat „STAT” (sürgős) jelölése:

Adott munkalistából válassza ki a vizsgálatot amit szeretne sürgősként megjelölni.

Ezután kattintson az adott vizsgálatra jobb egérgombbal- megjelenik a jobb klikk menü.

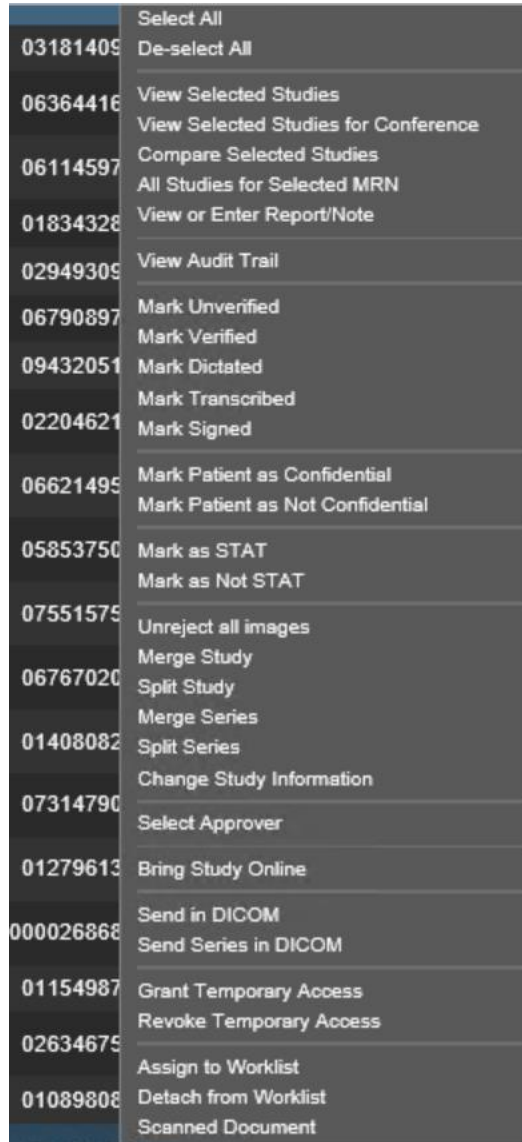

Válassza ki a „Mark as STAT” opciót.

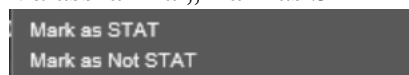

Adott vizsgálat „STAT” jelöléssel, pirossal fog ábrázolódni.


	Páciens Neve	TAJ	Img	Study Description	PATIENT_COMMENTS	INSTITUTION	Department
	TESTPATIENT	TEST112233	0	Unspecified MR CSPINE	Unspecified	Unspecified	Unspecified

 GE Healthcare	Centricity Universal Viewer	Centricity UV release: SP 9
Kiegészítő dokumentáció- Sürgős Vizsgálat		

„STAT” munkalista létrehozása:

Kattintson a Search  ikonra.

Új ablak jelenik meg:

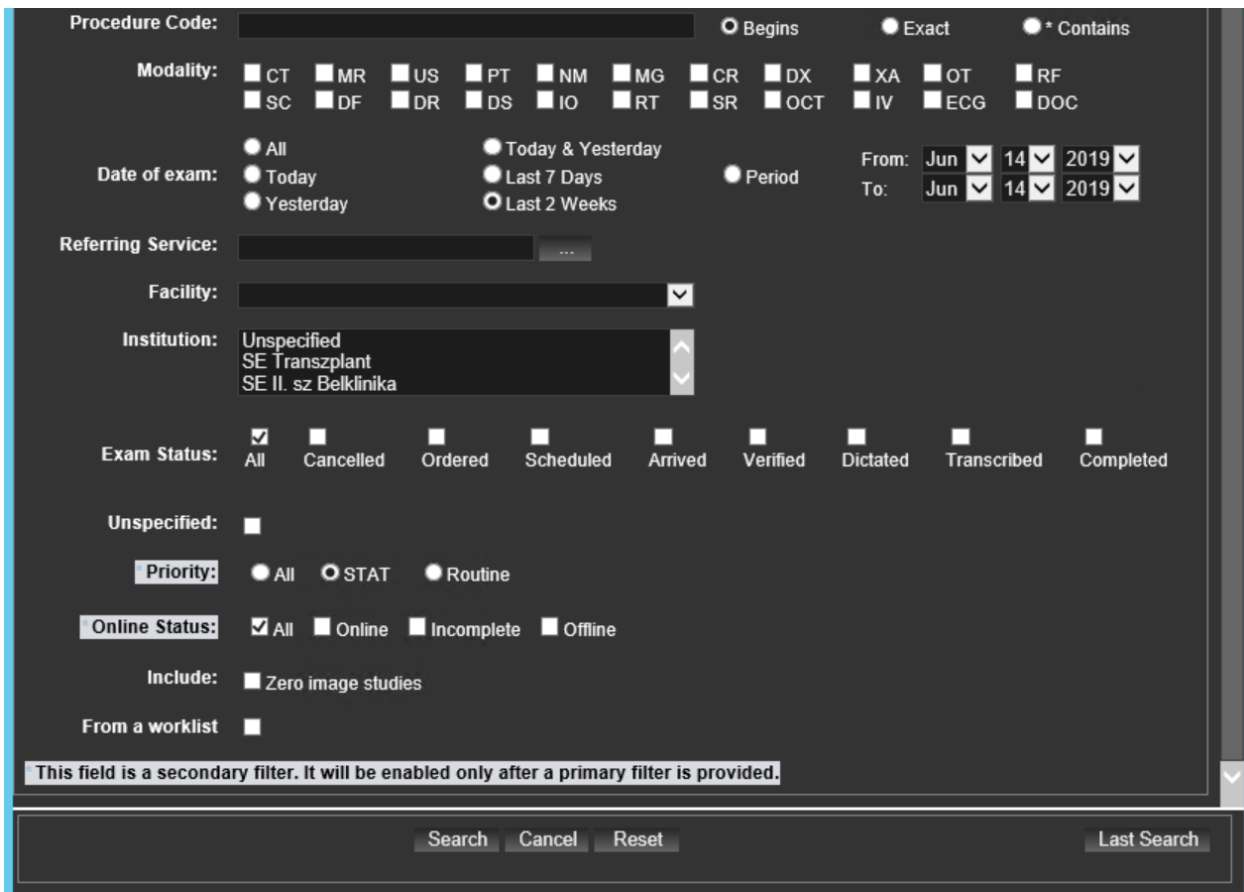


Tetszőlegesen beállíthatja a keresés paramétereit, dátumra, modalitásra stb.

Fontos: STAT kiválasztásához meg kell adni legalább egy kritériumot (dátum, modalitás, név stb.).

Ezután kattintson a „Search” gombra.


Keresési eredményként („Search Result”) látható a beállított paramétereknek megfelelő vizsgálatok.

Jobb egérgombbal kattintson a „Search Result”-ra. Megjelenik egy opció- „Save Search As..”.

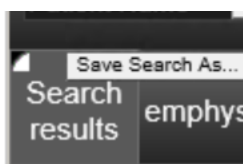

 GE Healthcare	Centricity Universal Viewer	Centricity UV release: SP 9
Kiegészítő dokumentáció- Sürgős Vizsgálat		

Kattintson rá, majd nevezze el az adott keresési feltételt tetszőlegesen:

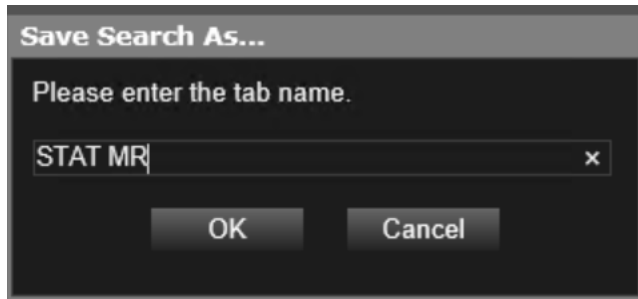

Ezután megjelenik egy új munkalista ezzel a névvel.



A fül alatt megtalálható az összes, megadott kritériumoknak megfelelő „STAT” jelzésű vizsgálat.

