


MedSol-ból való vizsgálat megnyitása után:

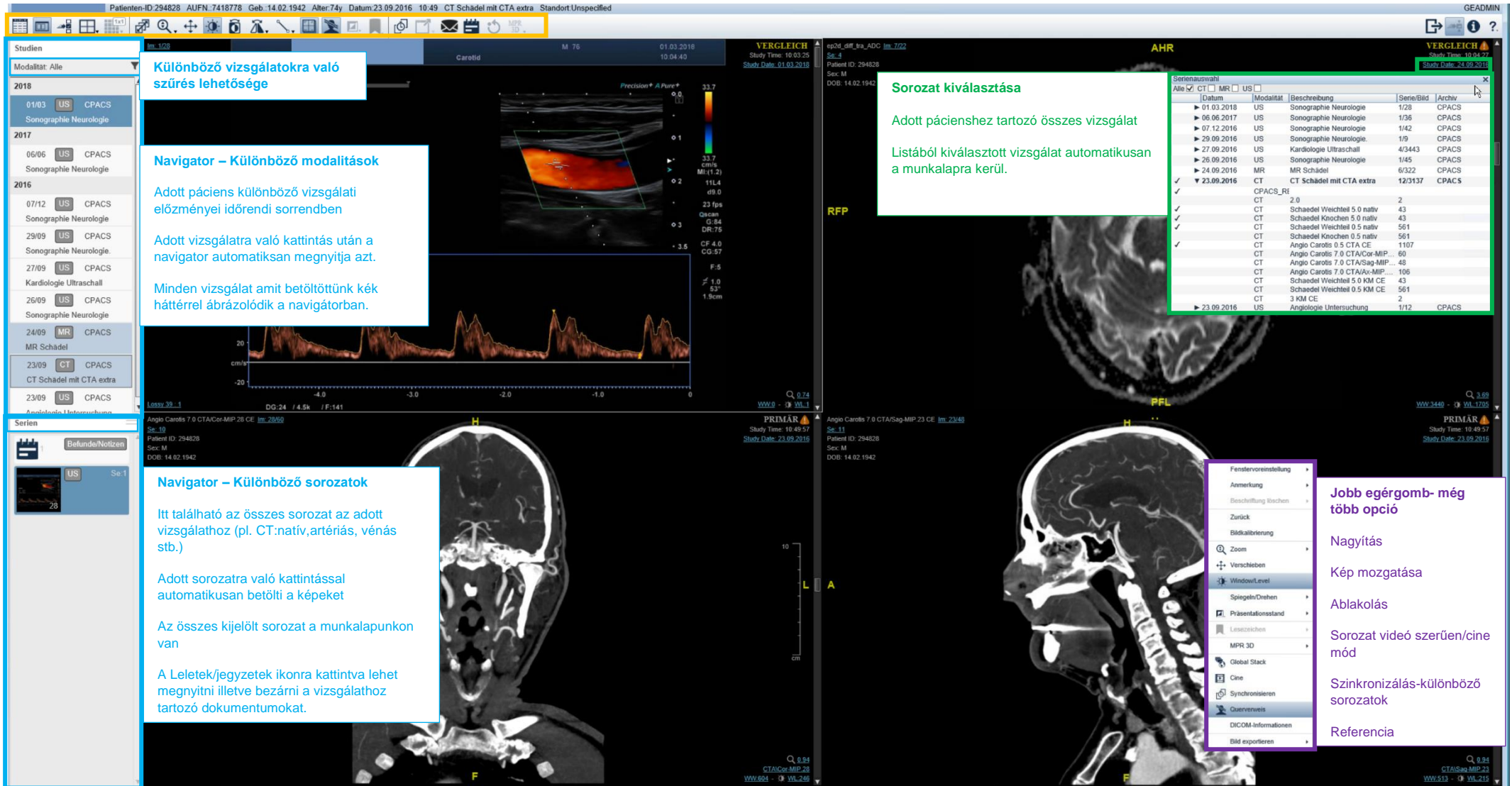

Különböző vizsgálatokra való szűrés lehetősége

Navigátor – Különböző modalitások

Adott páciens különböző vizsgálati előzményei időrendi sorrendben

Adott vizsgálatra való kattintás után a navigátor automatikusan megnyitja azt.

Minden vizsgálat amit betöltöttünk kék háttérrel ábrázolódik a navigátorban.

Sorozat kiválasztása

Adott pácienshez tartozó összes vizsgálat

Listából kiválasztott vizsgálat automatikusan a munkalapra kerül.

Datum	Modalitát	Beschreibung	Serie/Bild	Archiv
01.03.2018	US	Sonographie Neurologie	1/28	CPACS
06.06.2017	US	Sonographie Neurologie	1/38	CPACS
07.12.2016	US	Sonographie Neurologie	1/42	CPACS
29.09.2016	US	Sonographie Neurologie	1/9	CPACS
27.09.2016	US	Kardiologie Ultraschall	43443	CPACS
26.09.2016	US	Sonographie Neurologie	1/45	CPACS
24.09.2016	MR	MR Schädel	6/322	CPACS
23.09.2016	CT	CT Schädel mit CTA extra	12/3137	CPACS
	CPACS_RE			
	CT	2.0	2	
	CT	Schädel Weichteil 5.0 nativ	43	
	CT	Schädel Knochen 5.0 nativ	43	
	CT	Schädel Weichteil 0.5 nativ	561	
	CT	Schädel Knochen 0.5 nativ	561	
	CT	Angio Carotis 0.5 CTA CE	1107	
	CT	Angio Carotis 7.0 CTA/Cor-MIP...	60	
	CT	Angio Carotis 7.0 CTA/Sag-MIP...	48	
	CT	Angio Carotis 7.0 CTA/Ax-MIP...	106	
	CT	Schädel Weichteil 5.0 KM CE	43	
	CT	Schädel Weichteil 0.5 KM CE	561	
	CT	3 KM CE	2	
23.09.2016	US	Angiologie Untersuchung	1/17	CPACS

Navigátor – Különböző sorozatok

Itt található az összes sorozat az adott vizsgálathoz (pl. CT:natív,artériás, vénás stb.)

Adott sorozatra való kattintással automatikusan betölti a képeket

Az összes kijelölt sorozat a munkalapunkon van

A Leletek/jegyzetek ikonra kattintva lehet megnyitni illetve bezárni a vizsgálathoz tartozó dokumentumokat.

Jobb egérgomb- még több opció

- Nagyítás
- Kép mozgatása
- Ablakolás
- Sorozat videó szerűen/cine mód
- Szinkronizálás-különböző sorozatok
- Referencia

Főmenü:



- 1 – Munkalista (Csak Stand alone módban)
- 2 – Navigátor (bekapcsolás/kikapcsolás)
- 3 – Sorozatválasztó
- 4 – Monitor Elrendezése
(Monitor megosztása)
- 5 – Sorozat elrendezése
(Különböző sorozatok elhelyezése)
- 6 – Görgetés
- 7 – Nagyítás/kicsinyítés
- 8 – Páztázás- kép mozgatása
- 9 – Ablakolás
- 10 – Inverz
- 11 – Forgatás/tükrözés

- 12 – Annotáció/Mérések
- 13 – Adatréteg átfedés (bekapcsolás/kikapcsolás)- pl. betegadatok, vizsgálati adatok eltűntetése
- 14 – Keresztreferencia (bekapcsolás/kikapcsolás)
- 15 – Állapot mentése- adott elrendezés; pl.hol jár a vizsgálat leletezésénél, beállított ablakolás, sorozatok hol szerepelnek
- 16 – Könyvjelző (egymonitoros beállításnál nyitja meg az elmentett könyvjelzőket)
- 17 – Szinkronizálás
- 18 – Külső alkalmazás megnyitása
- 19 – Vizsgálat URL linkje
- 20 – Lelet/jegyzet
- 21 – Visszaállítás
- 22 – MIP/MPR rekonstrukció

Gyors változtatások- sorozat kiválasztás, nagyítás, görgetés, ablakolás:



Bal egér funkció :

1. Görgetés/lapozás aktiválása (Shift gomb folyamatos nyomásával gyorsabb görgetés)
2. Sorozat kiválasztás
3. Nagyítás
4. Ablakolás
5. Csúszka-sorozat végiglapozása

Még több egér funkció::

1. Középső görgő = Lapozás
2. Középső görgő lenyomása = Nagyítás
3. Jobb egér gomb = Ablakolás