

FÉLÁLARC „RÖVID” FERTŐTLENÍTÉSE

Az alábbi előírások a műszak során, folyamatos használat mellett alkalmazandók

1.

- KÉSZÍTSEN ELŐ ALKOHOL TARTALMÚ FERTŐTLENÍTŐKENDŐT: GYÁRILAG ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKET VAGY FERTŐTLENÍTŐVEL ÁTITATOTT TEXTILT/HASI TÖRLŐT

2.

- KESZTYŰBEN VEGYE LE A FÉLÁLARCOT A TANULT MÓDON

3.

- AKASSZA FEL A FÉMFOGASRA A FÉLÁLARCOT
NE SZERELJE A SZŰRŐKET!

4.

- A FERTŐTLENÍTŐ KENDŐVEL TÖRÖLJE ÁT A FÉLÁLARC TELJES KÜLSŐ FELÜLETÉT
TÖRÖLJE ÉS NE LEFÚJJA A FERTŐTLENÍTŐVEL!

5.

- HA A BELSŐ FELÜLETE LÁTHATÓAN SZENNYEZŐDÖTT, AKKOR AZT IS TÖRÖLJE ÁT:
VÁRJA MEG AMÍG A FERTŐTLENÍTŐ HAT A FÉLÁLARC KÜLSŐ FELÜLETÉN (5 PERC), MAJD TISZTA KESZTYŰVEL FOGJA MEG ÉS TÖRÖLJE ÁT BELÜLRŐL EGY MÁSIK FERTŐTLENÍTŐ KENDŐVEL

6.

- TARTSA BE AZ ELŐÍRT BEHATÁSI IDŐT (5 PERC)

7.

- VEGYE LE A KESZTYŰT ÉS FERTŐTLENÍTSE A KEZÉT!

8.

- A HULLADÉKOT DOBJA A MEGFELELŐ VESZÉLYES HULLADÉKGYŰJTŐBE

FÉLÁLARC „HOSSZÚ” FERTŐTLENÍTÉSE

Az alábbi előírások a műszak végén alkalmazandók

1.

- VEGYEN FEL KESZTYÚT!

2.

- SZERELJE LE A SZŰRŐKET ÉS ALKOHOL TARTALMÚ FERTŐTLENÍTŐVEL TÖRÖLJE ÁT A TELJES FELÜLETÉT (használjon alkoholos fertőtlenítőkendőt vagy gézre/hasi törlóre fújt felületfertőtlenítőt)
TÖRÖLJE ÉS NE LEFÚJJA A FERTŐTLENÍTŐVEL!

3.

- A SZŰRŐKET **HELYEZZE** A NEVÉVEL ELLÁTOTT **NYLON ZACSKÓBA** ÉS A BEHATÁSI IDŐ LETELTE UTÁN (**5 PERC**) ZÁRJA LE AZT

4.

- A FÉLÁLARCOT HELYEZZE AZ OLDATBA KILÉGZŐ SZELEPPEL LEFELÉ ÚGY, HOGY A FEJPÁNTOKAT HAJTSA A MASZK ALÁ
AZ OLDATNAK EL KELL LEPNIE A MASZKOT!

5.

- HAGYJA AZ OLDATBAN AZ ELŐÍRT BEHATÁSI IDŐIG (**15 PERC**)
A HOSSZABB ÁZTATÁSI IDŐ ANYAGKÁROSODÁST OKOZHAT!

6.

- AZ ÁZTATÁST KÖVETŐEN ALAPOSAN ÖBLÍTSE LE FOLYÓVÍZZEL
ÖBLÍTÉS NÉLKÜL A VISSZAMARADT FERTŐTLENÍTŐSZER BŐRIRRITÁCIÓT OKOZHAT!

7.

- HELYEZZE A FÉLÁLARCOT A KIJELÖLT HELYRE SZÁRADNI A KILÉGZŐ SZELEPPEL FELFELÉ
GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY NEM MARADT FOLYADÉK A MASZK BELSEJÉBEN!

8.

- FERTŐTLENÍTSE AZ ÖBLÍTÉSRE HASZNÁLT MOSOGATÓMEDENCÉT
FELÜLETFERTŐTLENÍTŐVEL

9.

- VEGYE LE A KESZTYÚT ÉS FERTŐTLENÍTSE A KEZÉT!

10.

- A HULLADÉKOT DOBJA A MEGFELELŐ VESZÉLYES HULLADÉKGYŰJTŐBE

5%-os SEKUSEPT EXTRA N OLDATKÉSZÍTÉS

Az elkészített oldat 14 napig használható!

Az oldatot feliratozni kell: **dátum**, oldat neve, koncentráció, olvasható szignó

Oldat mennyiség	Víz mennyiség (ml)	Fertőtlenítő szer mennyiség (ml)	Behatási idő	Hatásspektrum
0,5 liter	475 ml	25 ml	15 perc	baktericid, fungicid, virucid, tuberkulocid
1 liter	950 ml	50 ml		
3 liter	2850 ml	150 ml		
5 liter	4750 ml	250 ml		
10 liter	9500 ml	500 ml		
30 liter	28500 ml	1500 ml		