

Vérminták kezelése, tárolása, szállítása A- és E-vitamin vizsgálatához

2024. október 4.

Az A- és E-vitamin vizsgálatához a mintát piros kupakos csőbe kell venni. A mintavétel után a cső tartalma standard beállításokkal (pl. 2500 x g, 10 perc) centrifugálandó. Kb. 0,25-0,5 ml felülúszót szekunder csőbe kell pipettázni. A laboratóriumba történő szállítás **fénytől és oxigéntől védve, fagyasztott állapotban** történjen, 24 órán belül. Szobahőmérsékleten vagy hűtve történő akár rövid idejű tároláskor, továbbá fénynek vagy oxigénnek kitéve az A- és E-vitamin nem tekinthető stabilnak. Jól lezárt, fénytől védett csőben, fagyott mintában az A- és E-vitamin 2 hónapig stabil.

Laboratórium címe: Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., 16. emelet.

Mintaátvétel: munkanapokon 8:00-15:00 óra (pénteki napokon 8:00-14:00 óra) között.

Kérdés esetén hívható: dr. Karvaly Gellért Balázs (tel. 20 825 9819, e-mail: karvaly.gellert.balazs@semmelweis.hu)