

Vérminták kezelése, tárolása, szállítása C-vitamin vizsgálathoz

2024. október 4.

A C-vitamin (aszorbinsav) vizsgálatához a mintát zöld kupakos csőbe kell venni. A mintavétel után a cső tartalmát haladéktalanul centrifugálni kell **hűtve**, standard beállításokkal (pl. 2500 x g, 10 perc). A felülúszó kb. 0,25-0,50 ml-es részletét a centrifugálás után **azonnal** szekunder csőbe kell juttatni, majd a szekunder csövet haladéktalanul fagyasztóba kell tenni. Szobahőmérsékleten vagy hűtve történő akár rövid idejű tároláskor, továbbá fénynek vagy oxigénnek kitéve a C-vitamin nem tekinthető stabilnak. A laboratóriumba történő szállítás **fagyasztva** történjen, 24 órán belül.

Laboratórium címe: Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., 16. emelet.

Mintaátvétel: munkanapokon 8:00-15:00 óra (pénteki napokon 8:00-14:00 óra) között.

Kérdés esetén hívható: dr. Karvaly Gellért Balázs (tel. 20 825 9819, e-mail: karvaly.gellert.balazs@semmelweis.hu)