

Vérminták kezelése, tárolása, szállítása szérum szteroidok vizsgálatához

2024. október 4.

A mintát piros kupakos csőbe kell venni. A mintavétel után a cső tartalmát standard beállításokkal (pl. 2500 x g, 10 perc) centrifugálni kell. A felülúszó **teljes mennyiségét** a szekunder csőbe kell juttatni. Az endogén mellékvesekéreg és gonadális szteroidok nem érzékenyek hőmérsékletre, fényre, vagy oxigénre. A szekunder csövek laboratóriumba történő szállítására legfeljebb 1 héten belül kerüljön sor.

Laboratórium címe: Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., 16. emelet.

Mintaátvétel: munkanapokon 8:00-15:00 óra (pénteki napokon 8:00-14:00 óra) között.

Kérdés esetén hívható: dr. Karvaly Gellért Balázs (tel. 20 825 9819, e-mail: karvaly.gellert.balazs@semmelweis.hu)