

Vérminták kezelése, tárolása, szállítása
hidroxiklorokin és dezetil-hidroxiklorokin vizsgálatához

2025. november 1.

A hidroxiklorokin és a dezetil-hidroxiklorokin vizsgálatához a mintát lila kupakos (alvadásgátlóként K₃-EDTA-t) tartalmazó csőbe kell venni. A mintavétel után a csövet centrifugálás nélkül kell tárolni. A laboratóriumunkba 24 órán belül történő szállítás esetén hűtve, azt meghaladó szállítási és tárolási időn esetén fagyasztva kérjük elküldeni a mintát.

Laboratórium címe: Semmelweis Egyetem Laboratóriumi Medicina Intézet, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., 16. emelet.

Mintaátvétel: munkanapokon 8:00-15:00 óra (pénteki napokon 8:00-14:00 óra) között.

Kérdés esetén hívható: dr. Karvaly Gellért Balázs (tel. 20 825 9819, e-mail: karvaly.gellert.balazs@semmelweis.hu)